



アプリでInBody結果が管理できます。

まずはInBodyアプリをダウンロードしてください。



InBody(無料)

Google Playストア、または
App Storeでアプリケーション
をダウンロードできます。



アプリのダウンロード
【iOS版】



アプリのダウンロード
【Android版】*1



< 互換性 >

○ iPhone: iOS8.0以上 ○ Android: 5.0以上

※ タブレット端末ではアプリケーションをダウンロードできません。

※ 通信環境がない場所ではアプリケーションを起動することができません。

*1 QRコードが読み取れない場合は、Google Playストア内から「インボディ」で検索してください。

ダウンロード完了後にInBodyアプリを起動して、新規登録を行ってください。

携帯番号入力

健康管理のパートナー、InBodyアプリへようこそ。
アプリを利用するには、携帯番号を入れてください。

日本国 +81 V

携帯番号 080

確認

1 2 3
ABC DEF

4 5 6
GHI JKL MNO

7 8 9
PQRS TUV WXYZ

0

① InBodyアプリを起動し、携帯番号を入力してください。

新規登録

InBodyアプリへようこそ。
先ず、新規登録をお願いします。

携帯番号 080

メール inbody@inbody.co.jp

性別 女性 男性

身長(cm) 156.9

年齢 51

パスワード ●●●●●●

パスワード確認 ●●●●●●

利用約款に同意します。
 個人情報の取り扱いについて同意します。

保存

② メールアドレス・性別・身長・年齢・パスワードを入力してください。

製品設定

アプリを使用する前に
お持ちのBluetooth製品を選択してください。

InBody Dial
スマートフォン運動の家庭用体組成計

InBodyBAND2
体組成計機能付き活動量計

InBodyBAND
体組成計機能付き活動量計

業務用InBody
なし

③ 製品設定画面にある「業務用InBody」を選択してください。

体成分測定データを保存するためには、測定前に個人の登録が必要です。

新規登録の情報入力について

- ・身長、体重は体成分測定時に反映するものではありません。
- ・パスワードは英数字、大文字、小文字を含めて入力してください。
- ・【利用約款同意します】【個人情報取り扱いについて同意します】にを入れてください。